

MADE IN FRANCE 

Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	PHTALATES	LATEX
CE	I		

Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois, cependant sa conception est très fiable mais adaptée à un usage unique. Le dispositif est décontaminé par stérilisation à l'oxyde d'éthylène de façon à garantir à l'utilisateur un dispositif prêt à l'emploi médicalement propre.

1 - Identification du dispositif :



Dessillons & Dutrillaux

Zone Industrielle La Tuque
 Tél : +33 5 53 48 30 66
technique@ddmedical.fr


47240 CASTELCULIER
 Fax : +33 5 53 47 24 64
www.ddmedical.fr

Date du premier certificat de
 marquage CE : 2012

Page 1 / 4

2 - Références :

Référence	Désignation	Couleur du tube	Dimensions en cm		Dimensions de l'ensemble
			Largeur	Longueur	
GBDU101	Brassard monobloc nourrisson	Blanc	3.5	29	38
GBDU102	Brassard monobloc enfant	Rose	4.5	35	48
GBDU103	Brassard monobloc petit adulte	Parme	6	46	61
GBDU104	Brassard monobloc bras adulte	Bleu ciel	8	46	67
GBCU105	Brassard monobloc bras adulte L conique	Turquoise	10	47	70
GCDU103	Cuissard monobloc adulte droit	Jaune	8	76	97
GCDU104	Cuissard monobloc adulte droit	Violet	10	62	76
GCDU105	Cuissard monobloc adulte L droit	Vert	10	76	90
GCDU106	Cuissard monobloc adulte XL droit	Gris	10	82	100
GCDU107	Cuissard monobloc adulte XXL droit	Rouge	10	107	122
GCCU104	Cuissard monobloc adulte conique	Violet	10	62	76
GCCU105	Cuissard monobloc adulte L conique	Vert	10	76	90
GCCU106	Cuissard monobloc adulte XL conique	Gris	10	82	100
GCCU107	Cuissard monobloc adulte XXL conique	Rouge	10	107	122

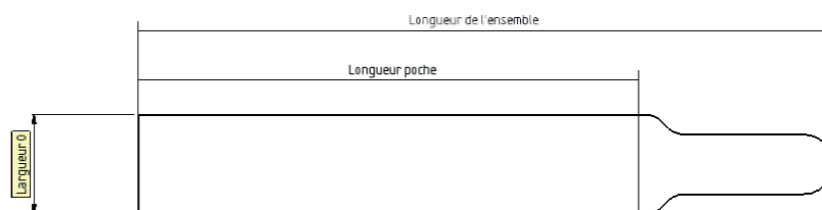

3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi :

- Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 mn.
- Avant d'effectuer la pose du garrot :
 - s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre, il faut impérativement que la poche du dispositif se superpose de minimum 2 cm. **Attention à ne pas confondre la poche et la longueur totale du dispositif (cf dessin ci-dessus)**
 - s'assurer de l'étanchéité de la poche du garrot,

Desillons & Dutrillaux

Zone Industrielle La Tuque
 Tél : +33 5 53 48 30 66
 technique@ddmedical.fr

47240 CASTELCULIER
 Fax : +33 5 53 47 24 64
 www.ddmedical.fr

Date du premier certificat de
 marquage CE : 2012

Page 2 / 4

- Positionner le brassard ou le cuissard sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.
- Introduire le raccord tube en butée (déclit) dans le coupleur rapide.
- Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s'assurer de la parfaite connexion des 2 parties.

Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois.

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensemble

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A		Brassard / Cuissard monobloc	Tissu enduit PU biocompatible sans latex
B	A11007	Raccord mâle pour brassard avec joint torique	ACETAL
C		Tube de liaison	PVC médical



5 - Nettoyage et désinfection :

Les brassards et cuissards ne sont pas destinés à être réutilisés, donc il n'est pas prévu de protocole de nettoyage et de désinfection.

6 - Conditionnement

Référence	Nbre d'unité par CDT
GBDU101	10
GBDU102	10
GBDU103	10
GBDU104	10
GBCU105	5
GCDU103	5
GCDU104	5
GCDU105	5
GCDU106	5
GCDU107	5
GCCU104	5
GCCU105	5
GCCU106	5
GCCU107	5

7 - Stockage

Tout brassard ou cuissard en attente d'utilisation doit être obligatoirement conservé dans les conditions ci-dessous :

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Médicalement propre	-10° à 40° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

8 - Garantie :

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.