

Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	PHTALATES LATEX	
CE	I		

Stéthoscope à micro double positions en inox avec une bague plastique anti-froid et des embouts de lyre souples.
 La lyre est en laiton chromé.

1 - Identification du dispositif



2 - Références


Référence	Désignation
S20019	Stéthoscope complet micro Ø 17 mm nourrisson
S20011	Stéthoscope complet micro Ø 34 mm pédiatrique
S20010	Stéthoscope complet micro Ø 45 mm adulte

3 - Utilisation du dispositif

- Auscultation cardiaque ■ ■ □
- Auscultation vasculaire ■ ■ □
- Auscultation pulmonaire ■ ■ □
- Prise de tension artérielle ■ ■ □

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Désignation	Caractéristique
A	A10360	Micro double position Ø 17 mm	Inox
A	A10109	Micro double position Ø 34 mm	Inox
A	A10108	Micro double position Ø 45 mm	Inox
B	A10361	Membrane Ø 17 mm	Terphane
B	A10351	Membrane Ø 34 mm	Terphane
B	A10106	Membrane Ø 45 mm	Terphane
C	A10103	Embout de lyre	PVC moulé ultra souple
D	A10104	Lyre (avec embouts)	Tube en laiton chromé+ PVC
E	A10105	Monture en Y	PVC moulé
F	A10350	Bague anti-froid	PVC

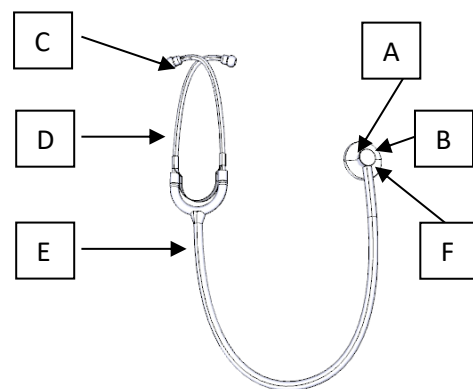

5 - Nettoyage désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes. Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
S20019	1
S20011	1
S20010	1

7 – Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

8 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 12 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.