

1 - Identification du dispositif :


Marquage	Indice de classement	PHTALATES	LATEX
CE	I		

Les brassards et cuissards sont des dispositifs médicaux utilisés avec un garrot pneumatique lors d'intervention chirurgicale des membres supérieurs ou inférieurs.

Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois, cependant sa conception est très fiable mais adaptée à un usage unique. Le dispositif est décontaminé par stérilisation à l'oxyde d'éthylène de façon à garantir à l'utilisateur un dispositif prêt à l'emploi médicalement propre.

2 - Références :

Référence	Désignation	Dimensions en cm		Dimensions de l'ensemble
		Largeur	Longueur	
GBDU101	Brassard monobloc nourrisson	3.5	29	38
GBDU102	Brassard monobloc enfant	4.5	35	48
GBDU103	Brassard monobloc petit adulte	6	46	61
GBDU104	Brassard monobloc bras adulte	8	46	67
GBCU105	Brassard monobloc bras adulte large conique	10	47	70
GCDU103	Cuissard monobloc adulte droit	8	76	97
GCDU104	Cuissard monobloc adulte droit	10	62	76
GCDU105	Cuissard monobloc adulte L droit	10	76	90
GCDU106	Cuissard monobloc adulte XL droit	10	82	100
GCDU107	Cuissard monobloc adulte XXL droit	10	107	122
GCCU104	Cuissard monobloc adulte conique	10	62	76
GCCU105	Cuissard monobloc adulte L conique	10	76	90
GCCU106	Cuissard monobloc adulte XL conique	10	82	100
GCCU107	Cuissard monobloc adulte XXL	10	107	122

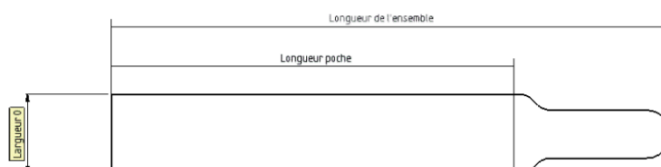

3 - Caractéristiques techniques :

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A		Brassard / Cuissard monobloc	Tissu enduit PU biocompatible sans latex
B	A11007	Raccord mâle pour brassard avec joint torique	ACETAL
C		Tube de liaison	PVC médical



4 - Mode d'emploi :

- Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 min.
- Avant d'effectuer la pose du garrot :
 - s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre
 - s'assurer de l'étanchéité de la poche du garrot
 - s'assurer de la qualité des velcros et des coutures sur le brassard / Cuissard
- **Positionner l'enveloppe de garrot sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.**
- Introduire le raccord tube en butée (déclit) dans le coupleur rapide.
- Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s'assurer de la parfaite connexion des 2 parties.

5 - Maintenance :

Sans objet : le dispositif est destiné à être utilisé qu'une seule fois.

6 - Nettoyage et décontamination :

Les brassards et cuissards ne sont pas destinés à être réutilisés, donc il n'est pas prévu de protocole de nettoyage et de désinfection.

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Médicalement propre	-10° à 40° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

8 - Garantie :

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.