


1 - Identification du dispositif :

Marquage	Indice de classement	PHTALATES LATEX
CE	I	

Les bandes d'Esmarch sont des dispositifs médicaux utilisés pour exsanguiner un membre inférieur ou supérieur lors d'interventions chirurgicales.

Ce dispositif est destiné à être utilisé qu'une seule fois, cependant sa conception est très fiable mais adaptée à un usage unique. Le dispositif est décontaminé par stérilisation à l'oxyde d'éthylène

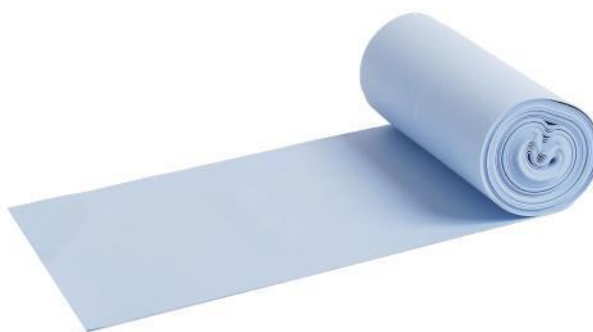

2 - Références :

Référence	Désignation	Dimensions en mm	
		Longueur	Largeur
BEU104	Bande d'esmarch usage unique	400	10



3 - Caractéristiques techniques :

Identifiant	Dénomination	Caractéristique
A	Elastomère de polyisoprène	Polyisoprène Biocompatible Sans LATEX



4 - Mode d'emploi :

Le process d'utilisation est similaire à toute mise en place de ce type de dispositif.

- Lever le membre à la verticale
- Enrouler la bande d'esmark de l'extrémité inférieure vers la racine du membre en prenant soin de ne superposer que les bords de la bande sur un centimètre environ.
- Au niveau voulu, en général à la racine du membre, superposer plusieurs tours de bande et replier son extrémité en nouant le tout.
- Dérouler la bande d'esmark de l'extrémité inférieure vers la partie supérieure du membre.

Laisser à ce niveau le bracelet formé par les tours superposés. Mettre en place au niveau voulu le brassard ou cuissard du garrot pneumatique et réaliser la mise en pression.

- Dénouer les tours superposés et enlever le reste de la bande d'esmark

5 - Maintenance :

Sans objet.

6 - Nettoyage et décontamination :

Les bandes d'Esmarch ne sont pas destinées à être réutilisées, il n'est donc pas prévu de protocole de nettoyage et de désinfection.

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Local ventilé	-10° à + 40° c	30 à 80 %	500 à 1060 hpA

8 - Garantie :

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.